

# Alcovisor® Satellite

Détecteur d'alcool éthylique à capteur  
électrochimique avec chargeur USB

## Manuel d'utilisation




Site web : <http://www.alcovisor.com>



## Points à retenir

1. Il est important d'observer une période d'au moins 20 minutes après la consommation d'un produit alcoolisé. Des résidus d'alcool se trouvant dans votre bouche peuvent fausser les résultats. Ses résidus peuvent provenir de boissons aromatisées, de bains de bouche, de médicaments, mais également après un rot ou un vomissement. Se rincer la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne réduit pas le délai d'attente.
2. Certains aliments et même certaines boissons non alcoolisées peuvent contenir des traces d'alcool, qui affecteront le résultat des tests, dû aux résidus d'alcool contenu dans la bouche. Pour y remédier, il faut observer une période de 20 minutes après la dernière consommation. Certains médicaments peuvent contenir de l'alcool. Un verre d'eau avant le test peut diluer la salive, réduisant ainsi temporairement le volume d'alcool dans l'haleine. Un délai d'au moins 2 minutes doit être pris entre le temps de la dernière cigarette et le test.

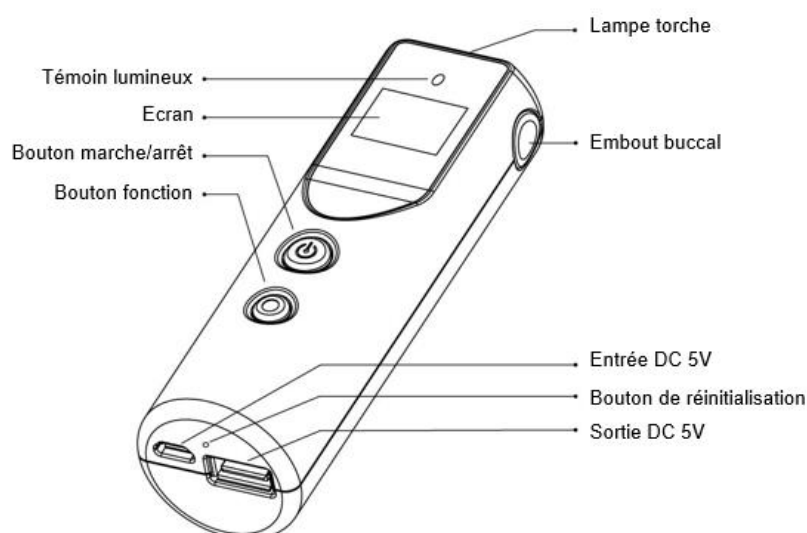

## Mode d'emploi

1. Mise en marche de l'appareil : Presser et maintenir le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez le "BIP", puis relâcher le bouton.
2. Nombre total de test après le dernier calibrage : Après calibrage, le nombre de test est remis à 0. Lors de la mise en marche de l'appareil, le nombre de test s'affiche à l'écran (Il est normal d'avoir un nombre supérieur à 0 pour un appareil neuf, cela est dû aux essais en usine qui suivent le calibrage).
3. Visualisation du résultat précédent : Le résultat du test précédent s'affiche à l'écran une fois la mise en marche de l'appareil.
4. Allumage de la lampe torche : Lorsque l'appareil est en marche, avec affichage "BLOW", appuyer sur le bouton fonction. Appuyer à nouveau sur le même bouton pour éteindre la lampe.

5. Faire un test d'alcoolémie :
  - i. Sur la 1<sup>ère</sup> ligne de l'écran est affichée la température ainsi que la charge de la batterie, i.e "25`C {||||}".
  - ii. Insérez un embout buccal dans l'orifice prévu à cet effet.
  - iii. Mettez en marche l'appareil, puis patientez jusqu'à l'affichage à l'écran de "BLOW...".
  - iv. Inspirez fort puis soufflez sans arrêt dans l'appareil aussi longtemps que possible. Un bip sonore continu se fera entendre pendant que vous soufflez.
  - v. Après avoir soufflé, s'affichera "WAIT" le temps de l'analyse. Au bout de quelques secondes, le résultat s'affichera.
  - vi. Lorsque le résultat du test est supérieur à 0, l'appareil émettra un bip rapide afin d'avertir l'utilisateur.
  - vii. Afin de recommencer le test, appuyez sur le bouton marche/arrêt une fois.
  - viii. Ne faites pas un nouveau test tout de suite après un test positif, patientez 1 minute et changez (de préférence) d'embout buccal pour prévenir de tout résidu suite au précédent test.
6. Arrêt de l'appareil : Pressez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde. Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.

## **Chargement**

### **1. Chargement du Satellite**

- A. Charger l'appareil via un adaptateur 5V 2A :
  - i. Connectez l'adaptateur à la source de courant, puis utilisez un câble USB pour le relier à l'interface d'entrée de l'appareil.
  - ii. Le témoin lumineux passe au rouge lorsque l'appareil se charge.
  - iii. Le témoin lumineux passe au vert lorsque l'appareil rechargé.
- B. Charger l'appareil via un PC:
  - i. Reliez le PC à l'interface d'entrée de l'appareil via un câble USB.
  - ii. Le témoin lumineux passe au rouge lorsque l'appareil se charge.
  - iii. Le témoin lumineux passe au vert lorsque l'appareil rechargé.

### **2. Satellite en tant que chargeur**

- A. L'appareil dispose d'une sortie DC5V/1A afin de recharger d'autres appareils tels que téléphone mobile, lecteur MP3, MP4, console portable, etc...
- B. Connectez vos appareils à la sortie DC 5V et commencez à charger.

## **Allumage de la lampe torche**

Mettez en marche l'appareil, puis appuyez sur le bouton fonction. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour éteindre la lampe.

## **Réinitialisation**

Si l'appareil ne répond plus aux commandes, appuyez sur le bouton réinitialiser à l'aide d'une épingle.